



Návod na ovládání tabletové aplikace AnumeApp - s vitálními daty

- Informace o klientech na lůžkách osazených měřícími podložkami jsou zobrazeny v aplikaci AnumeApp
- AnumeApp je již v tabletu nainstalována a jako jediná je na ploše tabletu
- Tablet musí být připojen k **wifi** síti a doporučujeme ho mít **stále na nabíječce**

1. Základní prostředí (pole “Stav” a “Postel”)

Zelená barva (ikona postele):

- Klient přítomen na lůžku

Modrá barva (ikona “tlapiček”):


- Klient je mimo lůžko

Červená barva (ikona křížku):

- Podložka neměří

Šedá barva (ikona “vypínače”):

- Monitoring postele byl vypnut stisknutím pole “stav” u daného lůžka

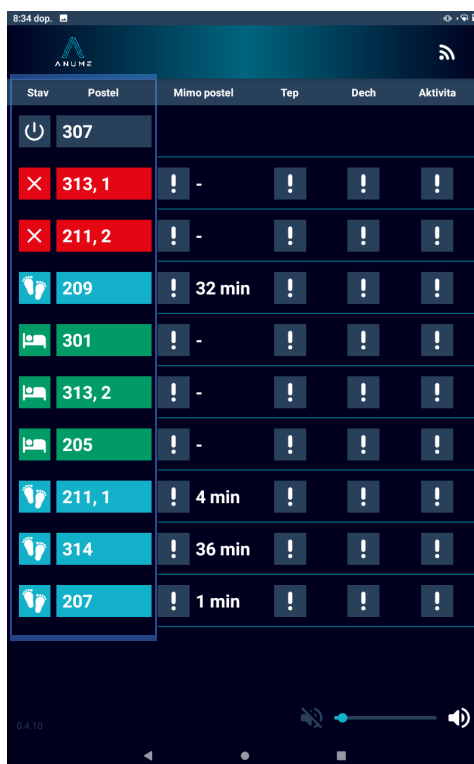

2. Základní prostředí - sledované položky

Mimo postel:

- Zobrazuje se doba, po kterou je klient mimo lůžko

Tep:


- Sledování tepové frekvence klienta

Dech:

- Sledování dechové frekvence klienta

Aktivita:


- Vztahuje se k polohování klienta a dodržování předepsaného intervalu pro pravidelné polohování
- Pravidelné intervaly jsou nastaveny dle požadavku dané instituce a nelze je v této aplikaci měnit

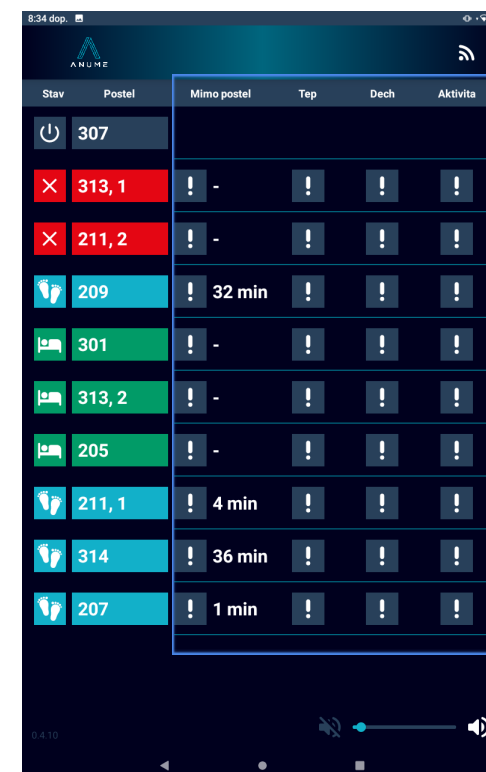

3. Alarmy - tlačítka s vykřičníkem obecně



	Hlídní dané položky a alarm jsou vypnuté.
	Alarm je aktivní a hodnoty jsou ve zvolených mezích.
	Hodnoty sledované položky (kromě opuštění lůžka) jsou mírně mimo zvolené limity.
	Hodnoty sledované položky jsou významně mimo zvolené limity.
	Uspaný alarm <ul style="list-style-type: none">- Alarm probíhá v uspaném režimu bez zvukového projevu → personál zaznamenal alarm a uspal ho- Uspání alarmu:<ul style="list-style-type: none">- přidržením vykřičníku červené barvy a zvolením doby, po kterou chceme alarm uspat- pouhým kliknutím na červený vykřičník (uspí se na dříve zvolený časový interval)- Kliknutím na uspaný alarm se hlídání a alarm vypne

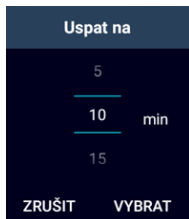

4. Alarmy (tlačítka s vykřičníkem) - Mimo postel



Zelená barva:

- Alarm je aktivní a není překročena nastavená hodnota pro opuštění lůžka

Červená barva:

- Klient překročil stanovený limit pro pobyt mimo lůžko
- Součástí je zvukový alarm

Šedá barva s červeným

vykřičníkem:

- Uspaný alarm viz karta 3

Šedá barva s bílým vykřičníkem:

- Bez nastaveného alarmu



5. Alarmy (tlačítka s vykřičníkem) - Tep



Zelená barva:

- Alarm je aktivní a tep je v rámci nastavených limitů

Oranžová barva:

- Tep je mimo nastavené limity po zadanou dobu, ale hodnoty tepu se pohybují v 5% pásu nad/pod zvoleným limitem

Červená barva:

- Tep je významně mimo nastavené limity po zadanou dobu
- Součástí je zvukový alarm

Stav	Postel	Mimo postel	Tep	Dech	Aktivita
307					
313, 1	!	-	!	!	!
211, 2	!	-	!	!	!
209	!	32 min	!	!	!
301	!	-	!	!	!
313, 2	!	-	!	!	!
205	!	-	!	!	!
211, 1	!	4 min	!	!	!
314	!	36 min	!	!	!
207	!	2 min	!	!	!

Šedá barva s červeným vykřičníkem:

- Uspaný alarm viz karta 3

Šedá barva s bílým vykřičníkem:

- Bez nastaveného alarmu

6. Alarmy (tlačítka s vykřičníkem) - Dech



Zelená barva:

- Alarm je aktivní a dech je v rámci nastavených limitů

Oranžová barva:

- Dech je mimo nastavené limity po zadanou dobu, ale hodnoty dechu se pohybují v 5% pásu nad/pod zvoleným limitem

Červená barva:

- Dech je významně mimo nastavené limity po zadanou dobu
- Součástí je zvukový alarm

Šedá barva s červeným vykřičníkem:

- Uspaný alarm viz karta 3

Šedá barva s bílým vykřičníkem:

- Bez nastaveného alarmu

Stav	Postel	Mimo postel	Tep	Dech	Aktivita
307					
313, 1	!	-	!	!	!
211, 2	!	-	!	!	!
209	!	32 min	!	!	!
301	!	-	!	!	!
313, 2	!	-	!	!	!
205	!	-	!	!	!
211, 1	!	4 min	!	!	!
314	!	36 min	!	!	!
207	!	2 min	!	!	!

7. Alarmy (tlačítka s vykřičníkem) - Aktivita



Zelená barva:

- Alarm je aktivní a polohování klienta je v rámci předepsaného intervalu

Oranžová barva:

- Klient nebyl polohován v rámci předepsaného intervalu a doba překročení je do 1 hodiny

Červená barva:

- Klient nebyl polohován v rámci předepsaného intervalu a doba překročení je delší než 1 hodina
- Součástí není zvukový alarm

Šedá barva s bílým vykřičníkem:


- Bez nastaveného alarmu

Stav	Postel	Mimo postel	Tep	Dech	Aktivita
307					
✗	313, 1	!	-	!	!
✗	211, 2	!	-	!	!
!	209	!	32 min	!	!
!	301	!	-	!	!
!	313, 2	!	-	!	!
!	205	!	-	!	!
!	211, 1	!	4 min	!	!
!	314	!	36 min	!	!
!	207	!	2 min	!	!



8. Detail klienta - grafické zobrazení

- Kliknutím na označení lůžka zobrazíte detail klienta:

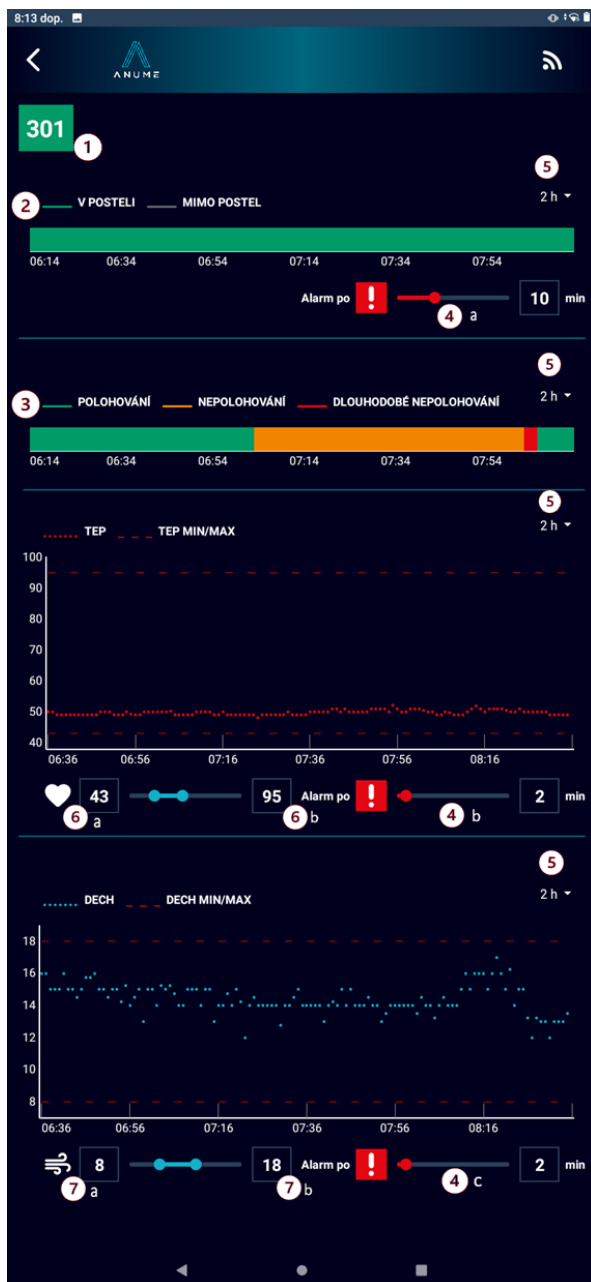

9. Detail klienta - vysvětlivky




- 1) Označení lůžka - barva odpovídá stavu klienta (zelená/modrá/červená)
- 2) Graf přítomnosti klienta na lůžku
 - a) zelená: v posteli
 - b) šedá: mimo postel
- 3) Graf polohování
 - c) zelená: polohuje se dle pravidelného intervalu
 - d) oranžová: nebylo polohováno v rámci předepsaného intervalu a doba překročení je do 1 hodiny
 - e) červená: nebylo polohováno v rámci předepsaného intervalu a doba překročení je delší než 1 hodina
- 4) Nastavení doby, po které se rozezní alarm pro
 - a) nepřítomnost na lůžku (0-30 minut)
 - b) tep - hodnoty tepu jsou mimo nastavené meze (ad 5) po zadanou dobu 0-30 minut
 - c) dech - hodnoty dechu jsou mimo nastavené meze (ad 6) po zadanou dobu 0-30 minut
- 5) Nastavení délky zobrazovaných úseků (2 h / 6 h / 12 h / 24 h)
- 6) Nastavení mezí pro TEP
 - a) dolní mez (0-125)
 - b) horní mez (45-200)
- 7) Nastavení mezí pro DECH
 - a) dolní mez (0-18)
 - b) horní mez (8-30)

Nastavení mezí a alarmů buď posunutím jezditka nebo kliknutím na hodnotu a vybráním požadované doby/meze.

10. Příklad nastavení alarmu - opuštění lůžka



- Zadání: U klienta na lůžku označeném 314 chceme hlídat, že je přítomen na posteli. Pokud bude mimo postel 5 minut a déle, rozezní se alarm.
- Postup:
 - Otevřít detail klienta
 - Nastavit dobu, po které se má rozeznít alarm

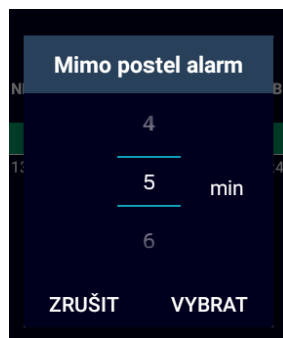


- Po vybrání doby musíme v základním prostředí kliknout na šedý vykřičník a aktivovat hlídání (pokud již nebylo zapnuto) → zelený vykřičník



- Pokud bude klient mimo lůžko dobu delší než 5 minut, rozezní se alarm



- Uspání alarmu 
 - a) Přidržením vykřičníku červené barvy a zvolení doby uspání
 - b) Kliknutím na červený vykřičník
 - viz karta 3
- Po návratu klienta na lůžko se alarm vypne a vrátí na zelený vykřičník

11. Příklad nastavení alarmu - TEP



- Zadání: U klienta na lůžku označeném 205 chceme hlídat tep. Tep by se měl pohybovat v mezích 50–110 bpm a limit pro alarm chceme 2 minuty.
- Postup:
 - Otevřít detail klienta (viz bod 8 tohoto návodu)
 - Nastavit meze a dobu, po které se má rozeznít alarm (viz body 8 a 9)



- Po nastavení musíme v základním prostředí kliknout na šedý vykřičník a aktivovat hlídání (pokud již nebylo zapnuto) → zelený vykřičník




- Chování:
 - a) Pokud budou hodnoty v zadaných mezích, bude políčko zelené.
 - b) Pokud se budou hodnoty pohybovat v 5 % pásu nad/pod zvoleným limitem (47,5–50 nebo 110–115,5) po dobu 2 minut - objeví se oranžové políčko.



- c) Pokud budou hodnoty výrazně mimo zadané meze tepu po dobu 2 minut, objeví se červené políčko a spustí se alarm.



- Uspání alarmu 
 - a) Přidržením vykřičníku červené barvy a zvolení doby uspání
 - b) Kliknutím na červený vykřičník
 - viz karta 3
- Pokud se hodnoty tepu vrátí do zvolených mezí, alarm se vypne a objeví se zelený vykřičník



Návod na ovládání tabletové aplikace AnumeApp - bez vitálních dat

- Informace o klientech na lůžkách osazených měřícími podložkami jsou zobrazeny v aplikaci AnumeApp
- AnumeApp je již v tabletu nainstalována a jako jediná je na ploše tabletu
- Tablet musí být připojen k **wifi** síti a doporučujeme ho mít **stále na nabíječce**

1. Základní prostředí (pole “Stav” a “Postel”)

Zelená barva (ikona postele):

- Klient přítomen na lůžku

Modrá barva (ikona “tlapiček”):


- Klient je mimo lůžko

Červená barva (ikona křížku):

- Podložka neměří

Šedá barva (ikona “vypínače”):

- Monitoring postele byl vypnut stisknutím pole “stav” u daného lůžka

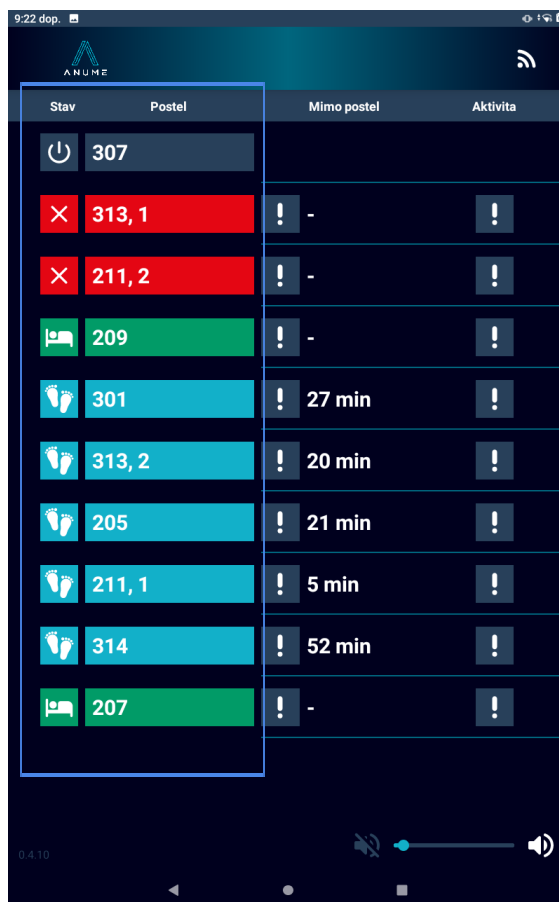


2. Základní prostředí - sledované položky

Mimo postel:

- Zobrazuje se doba, po kterou je klient mimo lůžko

Aktivita:

- Vztahuje se k polohování klienta a dodržování předepsaného intervalu pro pravidelné polohování
- Pravidelné intervaly jsou nastaveny dle požadavku dané instituce a nelze je v této aplikaci měnit

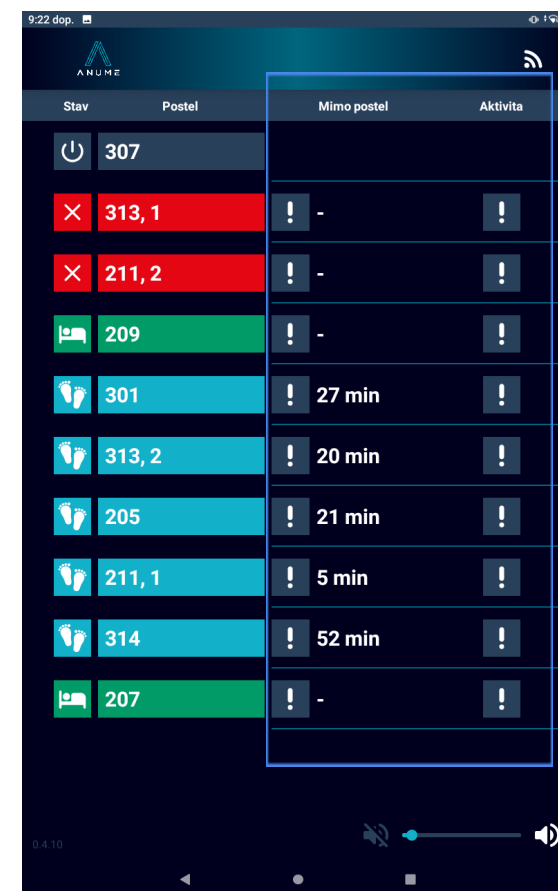

3. Alarmy (tlačítka s vykřičníkem) - Mimo postel



Zelená barva:

- Alarm je aktivní a není překročena nastavená hodnota pro opuštění lůžka

Červená barva:

- Klient překročil stanovený limit pro pobyt mimo lůžko
- Součástí je zvukový alarm

Šedá barva s červeným

vykřičníkem:

- Uspaný alarm (alarm probíhá v uspaném režimu bez zvukového projevu → personál zaznamenal alarm a uspal ho)
- Uspání alarmu:
 - přidržením vykřičníku červené barvy a zvolením doby uspaní
 - pouhým kliknutím na červený vykřičník (uspí se na dříve zvolený časový interval)
- Kliknutím na uspaný alarm se hlídání a alarm vypne

Šedá barva s bílým vykřičníkem:

- Bez nastaveného alarmu

Stav	Postel	Mimo postel	Aktivita	
🔌	307			
✖	313, 1	!	!	
✖	211, 2	!	!	
🛏	209	!	!	
🛏	301	!	!	
👣	313, 2	!	15 min	!
👣	205	!	17 min	!
👣	211, 1	!	1 min	!
👣	314	!	48 min	!
🛏	207	!		!

4. Alarmy (tlačítka s vykřičníkem) - Aktivita



Zelená barva:

- Alarm je aktivní a polohování klienta je v rámci předepsaného intervalu

Oranžová barva:

- Klient nebyl polohován v rámci předepsaného intervalu a doba překročení je do 1 hodiny

Červená barva:

- Klient nebyl polohován v rámci předepsaného intervalu a doba překročení je delší než 1 hodina
- Součástí je pouze vizuální alarm (bez zvukového alarmu)

Šedá barva s bílým vykřičníkem:


- Bez nastaveného alarmu

Stav	Postel	Mimo postel	Aktivita	
🔌	307			
✖	313, 1	!	!	
✖	211, 2	!	!	
🛏	209	!	!	
🛏	301	!	!	
👣	313, 2	!	15 min	!
👣	205	!	17 min	!
👣	211, 1	!	1 min	!
👣	314	!	48 min	!
🛏	207	!		!

5. Detail klienta


- Kliknutím na označení lůžka zobrazíte detail klienta:

- 1) Označení lůžka - barva odpovídá stavu klienta (zelená/modrá/červená)
- 2) Graf přítomnosti klienta na lůžku
 - a) zelená: v posteli
 - b) šedá: mimo postel
- 3) Graf polohování
 - a) zelená: polohuje se dle pravidelného intervalu
 - b) oranžová: nebylo polohováno v rámci předepsaného intervalu a doba překročení je do 1 hodiny
 - c) červená: nebylo polohováno v rámci předepsaného intervalu a doba překročení je delší než 1 hodina
- 4) Nastavení doby, po které se rozezní alarm pro nepřítomnost na lůžku (0-30 minut) - posunutím jezdítka nebo kliknutím na hodnotu a vybráním požadované doby
- 5) Nastavení délky zobrazovaných úseků (2 h / 6 h / 12 h / 24 h)

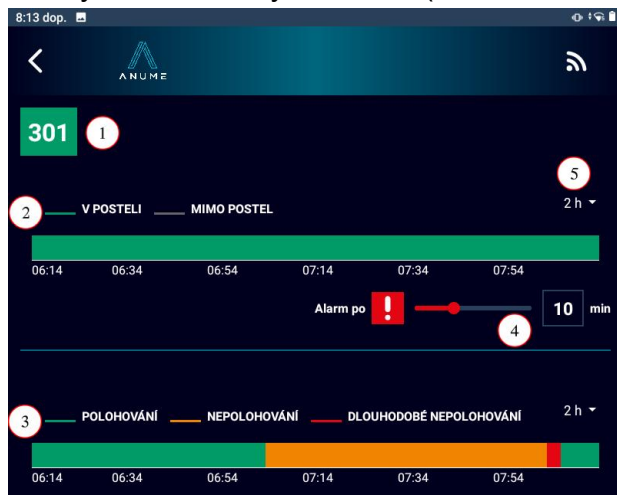

6. Příklad nastavení alarmu

- Zadání: U klienta na lůžku označeném 314 chceme hlídat, že je přítomen na posteli. Pokud bude mimo postel 5 minut a déle, rozezní se alarm.
- Postup:
 - Otevřít detail klienta
 - Nastavit dobu, po které se má rozeznít alarm

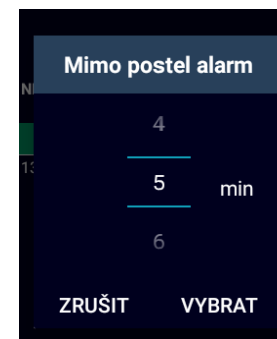


- Po vybrání doby musíme v základním prostředí kliknout na šedý vykřičník a aktivovat hlídání (pokud již nebylo zapnuto) → zelený vykřičník



- Pokud bude klient mimo lůžko dobu delší než 5 minut, rozezní se alarm



- Uspání alarmu :
 - a) Přidržením vykřičníku červené barvy a zvolení doby uspaní
 - b) Kliknutím na červený vykřičník (uspí se na dříve zvolený časový interval)
- Kliknutím na uspaný alarm (na červený vykřičník v šedém poli), alarm vypneme
- Po návratu klienta na lůžko se alarm vypne a vrátí na zelený vykřičník

